



Google Play 또는 App Store에서 ALCOSCAN 을 다운로드 받으세요

ALCOSCAN AL8800BT

AL8800 BT는 스마트 폰 App과 연결하여 언제(년,월,일,시간), 어디서(스마트폰 GPS 기능 활용), 누가(스마트폰 카메라 활용) 측정하여 그 결과를 App을 통하여 안전관리자에게 보고(SMS, SNS 및 이메일 송부)할 수 있도록 설계된 음주측정기 입니다.

또한 App을 통하여 제품에서 가장 중요한 전기화학식 알코올 전용센서의 품질을 진단할 수 있는 자가진단시스템(SDS)으로 센서 상태를 실시간 검사하여 정확한 음주측정을 제공하고 있습니다.

Sentech Korea Corp.

(우 10880) / 경기도 파주시 지목로 75번길 21-6

Tel. 82-31-8071-4400 / Fax. 82-31-8071-4411 / sentech@sentechkorea.com / www.sentechkorea.com

SENTECH


자기 진단 시스템 (SDS)

페어링 모드에서 AL8800BT를 사용할 때마다 센서 품질을 점검하여 제공됩니다.

- 카메라 모드 ON / OFF

측정자의 얼굴 사진을 찍어 실제 누가 테스트 하였는지 확인할 수 있습니다.

- SNS, SMS 및 전자 메일로 회사의 안전관리자 또는 가족, 친구 등과 음주 측정결과를 공유 할 수 있습니다

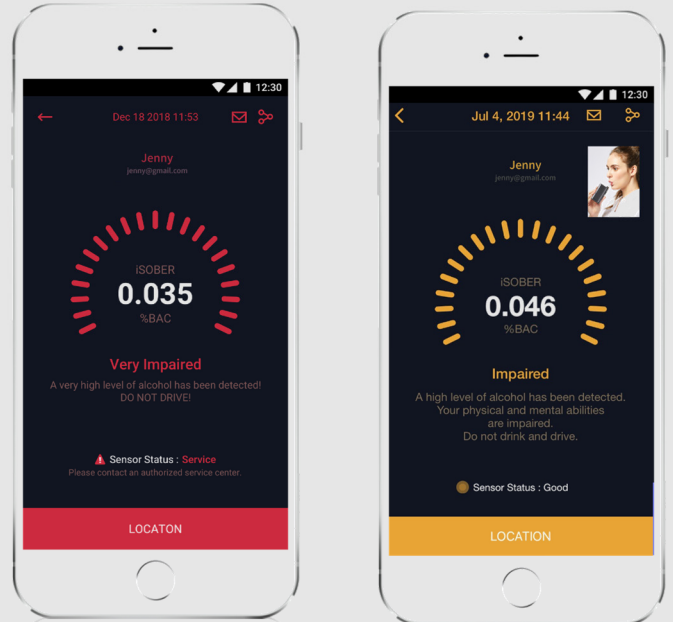

Spec.

센서타입	전기화학식 센서(Fuel Cell sensor)
전원	AAA 알카라인 건전지 2EA
무게	83g (배터리 포함)
제품크기(mm)	97.5 (높이) X 53.8 (넓이) X 18.0 (두께)
측정결과 표시	0.00 ~ 0.50 %BAC
초기 안정화 시간	5 초 ~ 120 초
분석시간	10초 이내 at 0.100 %BAC
오차범위	±10% (0.050%BAC 기준)
사용온도	5°C ~ 40°C
보관온도	0°C ~ 50°C
마우스피스	MP6000 / MP1000 사용 가능
추가기능	BLE 4.2
해외 규격 인증	FCC(미국전파인증), CE RED(유럽전파인증) Bluetooth(시그인증)

Certifications



Sentech Korea Corp.

(우)10880 / 경기도 파주시 지목로 75번길 21-6


Tel. 82-31-8071-4400 / Fax. 82-31-8071-4411 / sentech@sentechkorea.com / www.sentechkorea.com

SENTTECH


스마트폰 App(isober) 연동 사용 방법





스마트폰에 있는 App(ALCOSCAN)을 실행합니다.

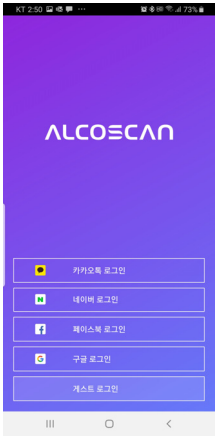


로그인
(또는 계정 생성)

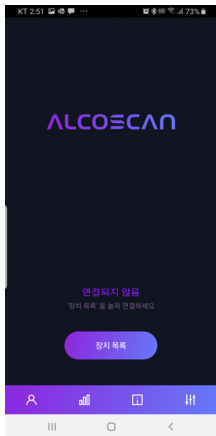


“장치목록” 클릭하여
측정기와 연결
(Pairing)

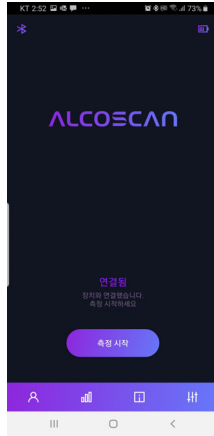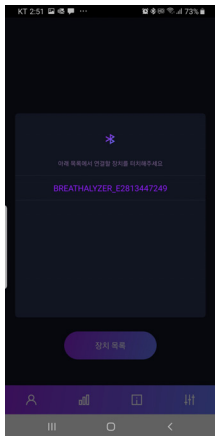


“측정시작” 클릭

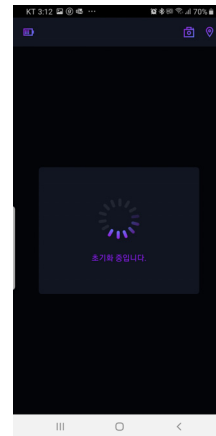


초기 안정화

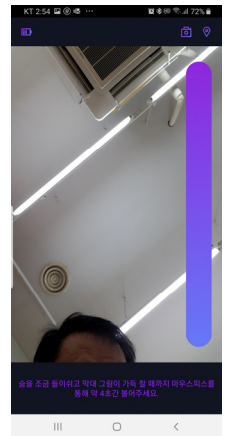

측정

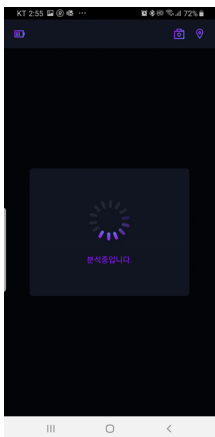


측정결과 분석

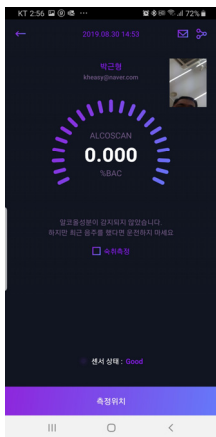


측정결과 표시



측정장소 표시

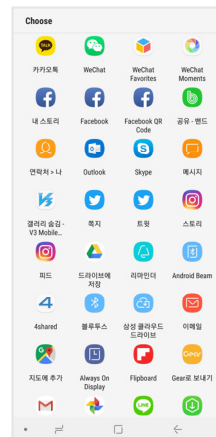

측정 결과 및 장소
공유(보고)

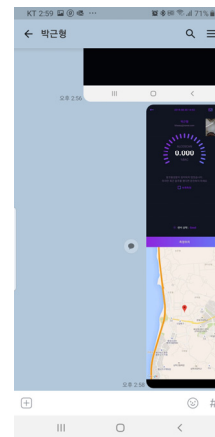

보고자의 카카오톡에
보고한 화면