


PREMIUM BREATHALYZER
ALCOSCAN
ALC-2




전기화학식 알코올 전용 센서 탑재
음주측정기 알코스캔 ALC-2

Suracell™ 전기화학식 센서 장착으로 정확도가 오래 유지되며 측정 결과를 소수점 3자리까지 표시해 자세한 수치 확인 가능

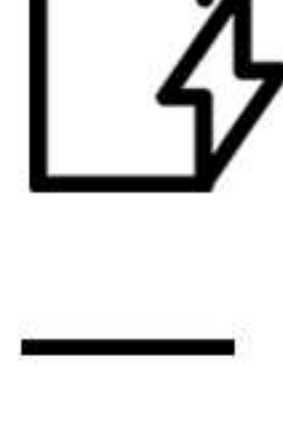

배터리

AAA 알카라인 건전지 2개로 2시간 연속 사용

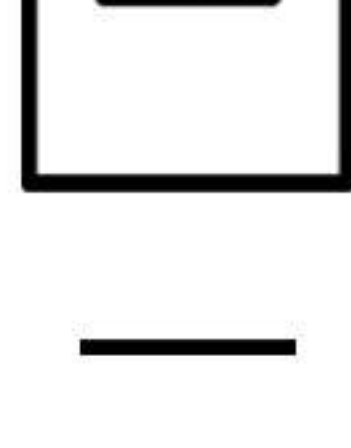

무게

핸드폰보다 가벼운 83g!



정확도


±0.005%BAC의 낮은 오차범위

제품특징

음주측정기의 내구성과 정확도를 보장하는 기준



ALC-2는 당사 개인 휴대용 음주측정기에 비해 **센서의 크기와 백금 함유량이 4배** 높아 더욱 정확한 음주 측정 결과를 확인할 수 있는 제품입니다

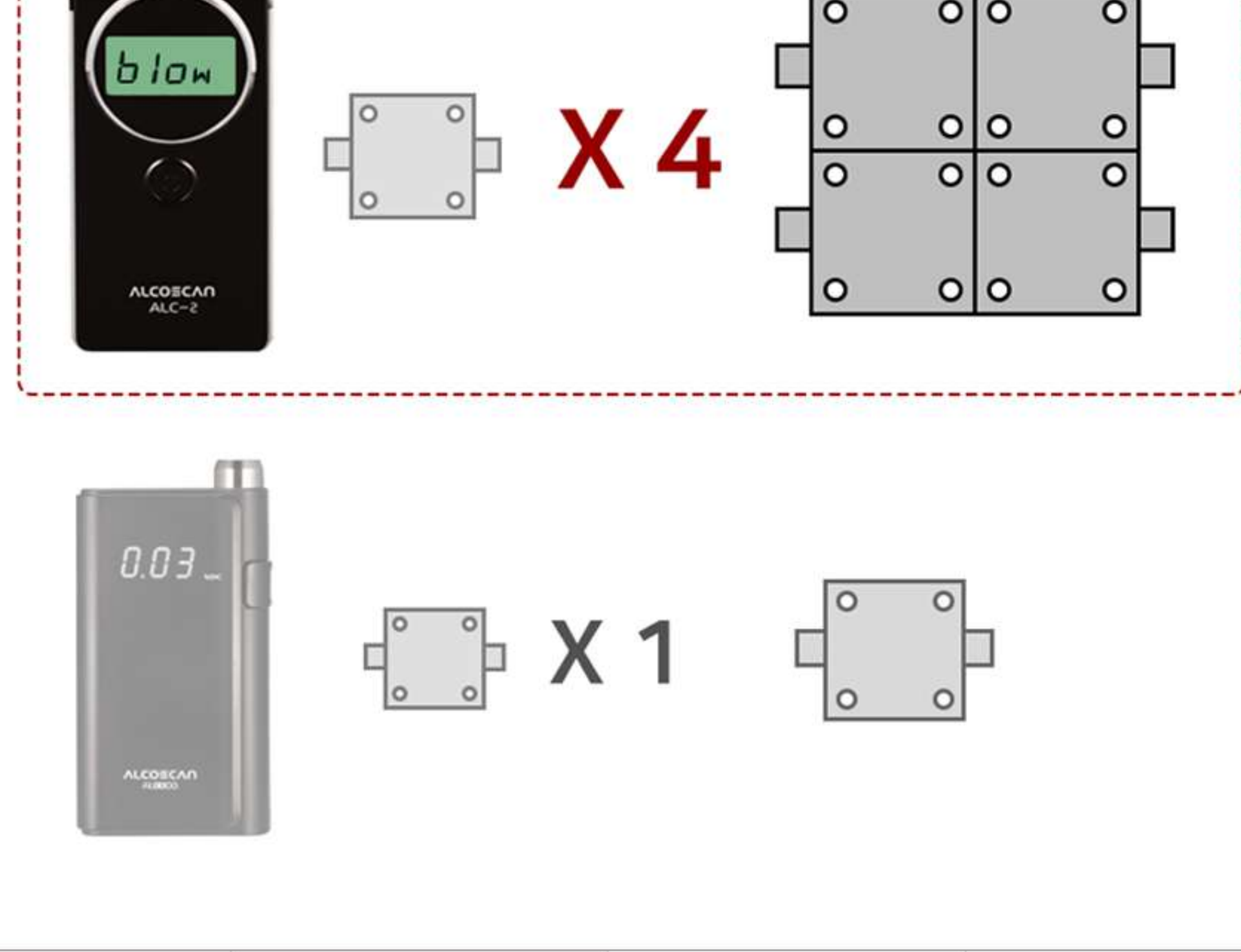

			
	ALC-2	AL8800	AL8800BT
센서타입	전기화학식 센서(대형)	전기화학식 센서(소형)	전기화학식센서(소형)
센서 백금함유량	AL8800, AL8800BT 백금 함유량의 4배	ALC-2 백금 함유량의 1/4	ALC-2 백금 함유량의 1/4
센서크기	AL8800, AL8800BT 센서 크기의 4배	ALC-2 크기의 1/4	ALC-2 크기의 1/4
오차범위	±10% 내외 (0.050%BAC) 기준	±20% 내외 (0.05%BAC) 기준	±20% 내외 (0.05%BAC) 기준
교정기간	1년 또는 1,000회	6개월 또는 500회	6개월 또는 500회
측정결과 표시	소수점 3자리	소수점 2자리	소수점 2자리
디스플레이 방식	LCD 디스플레이	FND(세그먼트)	FND(세그먼트)
이너 마우스피스	있음	없음	없음



자체 제작 센서 탑재
전기화학식 알코올 전용 센서

정확한 측정값
오차범위 ±0.005%BAC (0.050%BAC 측정시)

혈중 알코올 농도 표시
0.000%BAC ~ 0.400%BAC

세계적 인증 획득
KC, CE, RoHS

고급스러운 디자인
매트 그레이의 심플한 디자인



각부 기능/명칭



호흡구

이너 마우스피스 후크를 살짝 누르면서 당겨 마우스피스를 뺀 후 호흡을 불어 넣습니다 측정 시 뒷면의 환기구를 막지 않도록 주의합니다

LCD 디스플레이

선명하고 간결한 LCD 디스플레이 화면으로 소수 세 번째 자리까지 혈중 알코올 농도를 확인하실 수 있습니다

전원 버튼

전원 버튼을 누르면 blow가 표시됩니다 4초 이상 길게 호흡을 불어 넣어 줍니다

경고 표시

Flo

호흡시료가 부족한 경우 표시되는 메시지입니다 전원을 다시 켜고 측정 준비가 완료되면 4초 이상 불어주십시오

bAt

배터리 용량이 부족한 경우 표시되는 메시지입니다 새로운 배터리로 교체하여 주십시오(AAA 알카라인 2개)

CAL

1,000회 이상 사용한 경우 표시되는 메시지입니다 사용 후 1,000회 또는 6개월 중 하나라도 경과되면 교정을 받으세요 교정을 받으셔야 정확성을 유지하며 사용하실 수 있습니다

Err9

시스템 에러 메시지입니다. 제조사인 (주)센텍코리아에 점검을 의뢰하여 주시기 바랍니다

구성품

ALC-2 본체 | AAA알카라인 건전지 2개(제품내장)
플라스틱 케이스 | 파우치 | 마우스피스 5개
사용설명서 | 검교정&수리 신청서

알코스캔 ALC-2는 전용 종이 박스에 포장 후 배송되어 선물하기 좋습니다

